

MEDABUR®

Έτοιμο προς χρήση
απολυμαντικό για μικροεργαλεία και φρέζες

Το MEDABUR είναι ένα απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα οργανικά κατάλοιπα ενώ αποτρέπει την διάβρωση και τον αποχρωματισμό των εργαλείων. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα περιστροφικά εργαλεία όπως διαμάντια, φρέζες κοπής, τρυπάνια, κλπ ...

Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των εργαλείων ενδοδοντίας (ρίνες, διευρυντήρες), καθώς και των εργαλείων γενικής χρήσης (λαβίδες, ψαλίδια, κάτοπτρα, ανιχνευτήρες, κλπ...).

Το MEDABUR δεν περιέχει φαινόλες, αλδεϋδες, χλώριο, ή EDTA.

Ιδιότητες

- Έτοιμο προς χρήση
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση, ή σε λουτρό υπερήχων
- Δεν διαβρώνει, δεν αποχρωματίζει τα εργαλεία
- Πλήρως συμβατό ακόμα και με τα πιο ευαίσθητα υλικά
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus)

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Λεπτά
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans	5 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Ανατληρ. M. tuberculosis)	15 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Avium	15 Λεπτά

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIb



Συσκευασίες

- Φιάλη 2.5 λίτρων (Κωδ. 20005)
- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20006)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές - γαλάζιο διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.99 g/cm³ στους 20°C
- pH: 9.5-11.0 στους 20°C
- Οσμή: Ουδέτερη
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις. Εμβυθίστε τα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα και αφήστε τα για χρόνο επαφής ανάλογο με το επιθυμητό αποτέλεσμα (Βλ. πίνακα).

Ξεπλύνετε καλά τα εργαλεία σας με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Μετά την χρήση, διατηρήστε το διάλυμα σκεπασμένο. **Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 15 ημέρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ.** Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.

MEDABUR®

Έτοιμο προς χρήση
απολυμαντικό για μικροεργαλεία και φρέζες



Το MEDABUR παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Λουτρά υπερήχων

Το MEDABUR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα λουτρά υπερήχων από ανοξείδωτο ατσάλι. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα δεν θερμαίνεται.

Συμβατότητα

Το MEDABUR είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικά, σκληρά πλαστικά, εβονίτης, κλπ... Το MEDABUR δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν αλδεΐδες.

Συστατικά

N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ισοπροπυλική αλκοόλη, αναστολέας διάβρωσης, αντιαφριστικό παράγοντα, έκδοχα.

