

MEDAPRINT FOAM®

Spray moussant désinfectant pour empreintes dentaires

MEDAPRINT FOAM est un spray désinfectant spécialement développé pour le nettoyage et la désinfection rapides des empreintes dentaires. Sa forme moussante facilite et améliore la précision d'application sur les empreintes dentaires.

MEDAPRINT FOAM a été formulé pour assurer un large spectre d'activité antimicrobienne sans affecter la précision dimensionnelle des matériaux d'empreintes.

Il est entièrement compatible avec les alginates, silicones, polyéthers et hydrocolloïdes.

Propriétés

- Spray moussant pour une application facile et précise
- Large spectre d'activité antimicrobienne en 15 minutes
- Compatible avec les empreintes en alginates, silicones, polyéthers ou hydrocolloïdes
- Élimine efficacement les résidus organiques
- Bactéricide, levuricide
- Virucide (HBV, HIV, HCV, herpès, vaccinia, BVDV, grippe, ebola, coronavirus...)
- Tuberculocide, mycobactéricide
- Sans phénols, aldéhydes, chlore ou EDTA

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUCHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de saleté)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Min.
FONGICIDE (Conditions de saleté)	EN 13624	Candida Albicans	5 Min.
VIRUCIDE (Conditions de saleté)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut de M. tuberculosis)	15 Min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 Min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute – Autorité fédérale allemande de la santé

Certifications

- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe IIb

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.medalkan.fr

MEDALKAN - 102, rue Michalakopoulou, 11528 Athènes - Grèce - Tel.: (+30) 210-7484847 - Fax: (+30) 210-7772009 - www.medalkan.fr - contact@medalkan.gr



Conditionnement

- Spray de 1 litre (Ref. 20035)
- Bidon recharge de 5L (Ref. 20036)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution moussante
- Densité: 0.99 g/cm³ à 20°C
- pH: 9.5-10.5 à 20°C
- Odeur: Neutre
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Instructions d'utilisation

Vaporiser uniformément MEDAPRINT FOAM sur l'empreinte dentaire à désinfecter afin qu'elle soit entièrement en contact avec la mousse. Laisser agir selon l'activité de désinfection souhaitée (minimum 2 min.). Rincer puis essuyer avec un papier à usage unique. Votre empreinte est propre et désinfectée.


Ne pas mélanger avec d'autres désinfectants. Stocker entre +5°C et +35°C.



Medalkan
HYGIENE & DISINFECTION

MEDAPRINT FOAM[®]

Spray moussant désinfectant
pour empreintes dentaires

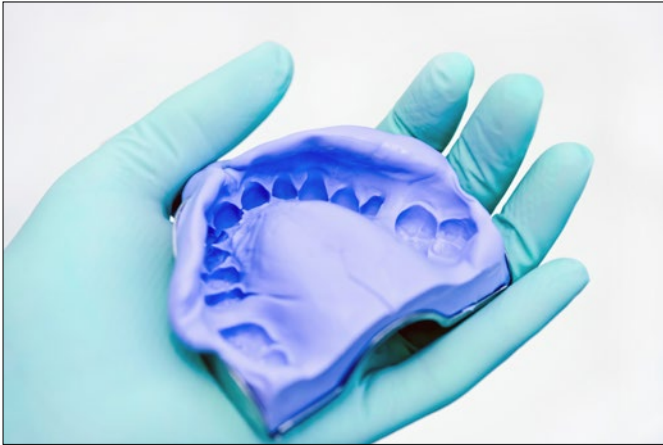

MEDAPRINT FOAM est fabriqué dans l'UE.

MEDALKAN satisfait au système de management de la qualité ISO 9001:2015 et aux exigences de la norme ISO 13485:2016 pour la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.

Compatibilité

MEDAPRINT FOAM est compatible avec les alginates, silicones, polyethers et hydrocolloïdes. Il n'est pas compatible avec les préparations désinfectantes contenant des aldéhydes.

Composition

N- (3-aminopropyl) -N dodecylpropano-1,3-diamine, <5% tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, agent mouillant, excipients.