

MEDAPRINT®

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

Το MEDAPRINT είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των οδοντιατρικών αποτυπωμάτων.

Δεν περιέχει αλδεϋδες και είναι πολύ οικονομικό στην χρήση. Δεν αλλοιώνει τις διαστάσεις των αποτυπωτικών υλικών.

Ιδιότητες

- Πολύ οικονομικό: 1% αραιώση
- Χρόνος δράσης: 15 λεπτά
- Συμβατό με αποτυπώματα από αλγινικό, σιλικόνη, πολυαιθέρα και υδροκolloειδές
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο κατά των ιών με περιβλήμα (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, influenza, Ebola, Coronavirus...)
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεϋδες, χλώριο, ή EDTA

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (1% αραιώση)	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	5 Λεπτά
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	<i>Candida Albicans</i>	5 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	15 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	<i>Mycobacterium Terrae</i> (Αναίτηρ. M. tuberculosis)	60 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	<i>Mycobacterium Terrae</i> <i>Mycobacterium Avium</i>	60 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIb



Συσκευασίες

- Φιάλη ενός λίτρου με δοσομετρητή (Κωδ. 20015)
- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 200016)
- Δοσομετρική αντλία για δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20023)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.99 g/cm³ στους 20°C
- pH: 12-12.8 στους 20°C
- pH (1%): 9.5-10.5 στους 20°C
- Οσμή: Ουδέτερη
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης


Αραιώστε 20 ml του MEDAPRINT σε 2 λίτρα κρύο νερό (αραίωση 1%). Ανακατέψτε ελαφρά. Εμβυθίστε τα αποτυπώματα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα και αφήστε τα ανάλογο με το επιθυμητό αποτέλεσμα (βλ. πίνακα).

Ξεπλύνετε τα καλά με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Μετά την χρήση, διατηρείστε το διάλυμα σκεπασμένο.

Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 15 ημέρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ. Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.

MEDAPRINT®

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό
οδοντιατρικών αποτυπωμάτων

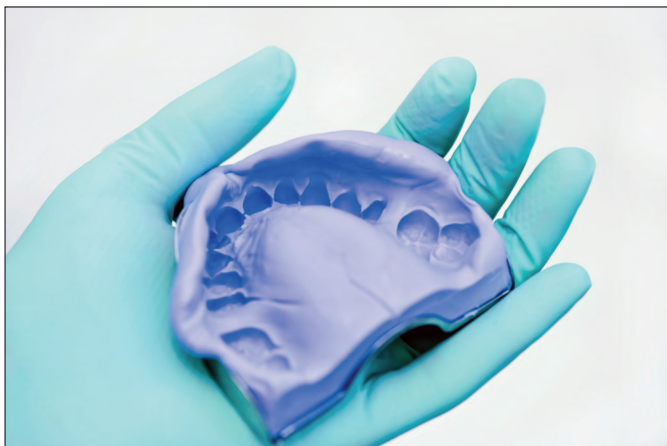

Το MEDAPRINT παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Συμβατότητα

Το MEDAPRINT είναι συμβατό με αποτυπώματα από αλγινικό, σιλκόνη, πολυαιθέρα και υδροκολλοειδές.

Το MEDAPRINT δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν αλδεΐδες.

Συστατικά

N-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, χλωρίδιο του διδεκυλο-διμεθυλαμμωνίου, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ισοπροπυλική αλκοόλη, αντιαφριστικό παράγοντα, έκδοχα.

