

# MEDASEPT® 100

Ευρέως φάσματος απολυμαντικό  
επιφανειών ταχείας δράσης



Το MEDASEPT 100 είναι ένα απολυμαντικό ταχείας δράσης και ευρέως φάσματος που εφαρμόζεται με ψεκασμό για την απολύμανση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά από κάθε συνεδρία.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης ανάμεσα σε ασθενείς. Συνιστάται για την απολύμανση των επιφανειών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (πάγκοι, οδοντιατρική έδρα, upit, χειρολαβές, πτυελοδοχείο, κλπ...) που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Έχει άριστες απολυμαντικές ιδιότητες και δεν αφήνει ίχνη αφού στεγνώσει. Το MEDASEPT 100 έχει ήπια οσμή και δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό.

## Ιδιότητες

- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus...)
- Ενεργεί μετά από 30 δευτερόλεπτα
- Δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό
- Δεν αφήνει υπολείμματα μετά το στέγνωμα
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες, χλώριο, ή EDTA

## Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
<b>ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ</b> (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 δευτ.
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ</b> (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis (Fungicidal)	30 δευτ. 5 Λεπτά
<b>ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ</b> (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV <sup>(1)</sup> /RKI <sup>(2)</sup> 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	30 δευτ.
<b>ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ</b> (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Avantlpr. M. tuberculosis)	3 Λεπτά
<b>ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ</b> (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	3 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

## Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa

Το MEDASEPT 100 παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευτείτε το [www.medalkan.gr](http://www.medalkan.gr)

**MEDALKAN - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΠΕ** - Μιχαλακοπούλου 102, 115-28 Αθήνα - Τηλ: 210-7484847 - Fax: 210-7772009 - [www.medalkan.gr](http://www.medalkan.gr) - [contact@medalkan.gr](mailto:contact@medalkan.gr)



## Συσκευασίες

- Φιάλη ενός λίτρου με σπρέι . (Κωδ. 20001)
- Δοχείο 5 λίτρων. (Κωδ. 20002)

## Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.97 g/cm<sup>3</sup> στους 20°C
- pH: 9.0-9.6 στους 20°C
- Οσμή: Ήπια (αλκοόλη)
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

## Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε το MEDASEPT 100 απευθείας στην επιφάνεια που θα καθαριστεί. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και σκουπίστε το με ένα καθαρό πανάκι. Αφήστε το να στεγνώσει. Μην ξεβγάζετε. Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Αποθηκεύστε μεταξύ +5°C και +35°C.

## Συστατικά

Ισοπροπυλική αλκοόλη, χλωρίδιο του διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου, N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, έκδοχα.



**Medalkan**  
HYGIENE & DISINFECTION