

MEDASPIR®

Υψηλής απόδοσης απολυμαντικό συστημάτων αναρρόφησης

Το MEDASPIR είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό υψηλής απόδοσης, για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση όλων των κοινών τύπων συστημάτων αναρρόφησης, των διαχωριστών αμαλγάματος και των πτυελοδοχείων.

Εξαφανίζει το βιοφίλμ διαλύοντας αίμα και πρωτεΐνες και αποτρέπει τον επανασηματισμό του.

Ιδιότητες

- Πολύ οικονομικό: 2% αραιώση
- Τετραπλή δράση: Καθαρίζει, απολυμαίνει, αφαιρεί τα άλατα, αρωματίζει
- Δεν αφρίζει, δεν διαβρώνει τον εξοπλισμό
- Χρόνος δράσης: 15 λεπτά
- Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες, ή χλώριο
- Δεν επηρεάζει τον εξοπλισμό
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο
- Ιοκτόνο κατά των ιών με περιβλήμα (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus...)

Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Λεπτά
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis (Fungicidal)	5 Λεπτά 60 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	15 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium terrae (Ανατληρ. M. tuberculosis)	60 Λεπτά

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

(2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa



Συσκευασίες

- Φιάλη 2.5 λίτρων (Κωδ. 20013)
- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20014)
- Δοσομετρική αντλία για δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20023)

Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές διάλυμα
- Πυκνότητα: 1.03 g/cm³ στους 20°C
- pH: 12.30 - 12.80 στους 20°C
- pH (2%): 10.40 - 10.80 στους 20°C
- Οσμή: Ελαφρώς αρωματική-Λεμόνι
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

Οδηγίες χρήσης

Αραιώστε 40 ml του MEDASPIR σε 2 λίτρα κρύο νερό (αραίωση 2%). Ανακατέψτε ελαφρά και αναρροφήστε το διάλυμα. Περιμένετε 15 λεπτά* και κατόπιν ξεπλύνετε αναρροφώντας 1 λίτρο νερού. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά στο τέλος της ημέρας.

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.

* Εναλλακτικά το αφήνετε όλη τη νύχτα

MEDASPIR®

Υψηλής απόδοσης απολυμαντικό
συστημάτων αναρρόφησης



Το MEDASPIR παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Συμβατότητα

Το MEDASPIR είναι συμβατό με όλους τους κοινούς τύπους συστημάτων αναρρόφησης, των διαχωριστών αμαλγάματος και των πτυελοδοχείων.

Συστατικά

N-(3-αμινοπρόπυλο)-N-δωδέκυλοπροπано-1,3-διαμίνη, τεταρτοταγή αμμωνιακά άλατα 5%-15%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, αντιαφριστικό παράγοντα, άρωμα, έκδοχα.

