

# NOSOPROTECT 100®

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό  
ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων

Το NOSOPROTECT 100 είναι ένα καθαριστικό και απολυμαντικό έτοιμο προς χρήση. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα οργανικά κατάλοιπα ενώ αποτρέπει την διάβρωση και τον αποχρωματισμό των εργαλείων.

Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των ειδών ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων όπως λαβίδες, ψαλίδια, βελόνες, κάτοπτρα, νυστέρια, λεπίδες, κλπ...

Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση, ή σε λουτρό υπερήχων.

Το NOSOPROTECT 100 δεν περιέχει φαινόλες, αλδεϋδες, χλώριο, ή EDTA.

## Ιδιότητες

- Έτοιμο προς χρήση
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση, ή σε λουτρό υπερήχων
- Δεν διαβρώνει, δεν αποχρωματίζει τα εργαλεία
- Πλήρως συμβατό ακόμα και με τα πιο ευαίσθητα υλικά
- Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο
- Ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus)

## Απολυμαντικές Ιδιότητες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Λεπτά
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 13624	Candida Albicans	5 Λεπτά
ΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	DVV <sup>(1)</sup> /RKI <sup>(2)</sup> 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Λεπτά
ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Αναστλρ. M. tuberculosis)	15 Λεπτά
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ (Υπό ρυπαρές συνθήκες)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 Λεπτά

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (German Association for the Control of Virus Diseases)

2) RKI: Robert Koch Institute - German Federal Health Authority

## Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC).
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIb



## Συσκευασίες

- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20008)

## Φυσικές Ιδιότητες

- Εμφάνιση: Διαφανές - γαλάζιο διάλυμα
- Πυκνότητα: 0.99 g/cm<sup>3</sup> στους 20°C
- pH: 9.5 - 11.0 στους 20°C
- Οσμή: Ουδέτερη
- Διατήρηση: 5°C - 35°C
- Σταθερότητα: 3 Έτη
- Βιοδιασπασιμότητα: Σύμφωνα με την OCDE 301D

## Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις. Εμβυθίστε τα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα και αφήστε τα για χρόνο ανάλογο με το επιθυμητό αποτέλεσμα (Βλ. πίνακα).

Ξεπλύνετε καλά τα εργαλεία σας με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά. Μετά την χρήση, διατηρείστε το διάλυμα σκεπασμένο. **Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 15 ημέρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ.**

Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα.

Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.



# NOSOPROTECT 100<sup>®</sup>

Ετοιμό προς χρήση απολυμαντικό  
ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων



Το NOSOPROTECT 100 παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

## Λουτρά υπερήχων

Το NOSOPROTECT 100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κοινούς τύπους λουτρών υπερήχων.

## Συμβατότητα

Το NOSOPROTECT 100 είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά όπως ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικά, σκληρά πλαστικά, εβονίτης, κλπ...

Το NOSOPROTECT 100 δεν είναι συμβατό με απολυμαντικά παρασκευάσματα που περιέχουν αλδεΐδες.

## Συστατικά

N-(3-αμινοπροπυλο)-N δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, μη ιονικά τασιενεργά <5%, αναστολέας διάβρωσης, αντιαφριστικό παράγοντα, έκδοχα.

