

NOSOZYM®

Ενζυματικό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων

Το NOSOZYM είναι ένα πολύ δραστικό συμπυκνωμένο καθαριστικό με ουδέτερο pH.

Περιέχει συνδυασμό ενζύμων (α-πρωτεάση, β-πρωτεάση λιπάση, αμυλάση) που διασπούν πρωτεΐνες, λίπη, άμυλο καθώς και κατάλοιπα αίματος.

Αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα οργανικά κατάλοιπα ενώ αποτρέπει την διάβρωση και τον αποχρωματισμό των εργαλείων. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο σκληρές εναποθέσεις.

Είναι κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων, αυτόματου πλυντηρίου ενδοσκοπίων, πλυντήρια-απολυμαντές, με εμβάπτιση, ή με συμβατικό πλύσιμο χειρός.

Είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια OLYMPUS®, KARL STORZ® και PENTAX MEDICAL®.

Ιδιότητες

- Συνδυασμός ενζύμων για ενισχυμένη αντιρρυπαντική δράση
- Αφαιρεί δραστικά τα οργανικά κατάλοιπα
- Πολύ οικονομικό: έως 0,5% αραιώση
- Κατάλληλο για καθαρισμό με χρήση λουτρού υπερήχων, αυτόματου πλυντηρίου, ή με συμβατικό πλύσιμο χειρός
- Δεν αφρίζει, δεν διαβρώνει, δεν αποχρωματίζει τα εργαλεία
- Εφαρμόζεται τόσο σε θερμοανθεκτικά όσο και σε θερμοευαίσθητα εργαλεία

Συστατικά

Μείγμα πρωτεολυτικών ενζύμων, λιπάση, αμυλάση, μη ιονικά ταισιενεργά <5%, αναστολέας διάβρωσης, ρυθμιστής pH, έκδοχα.

Συμβατότητα

Το NOSOZYM είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά όπως ανοξείδωτο ασάλι, αλουμίνιο, γυαλί, κεραμικά, σκληρά πλαστικά, εβονίτης, ελαστομερές, κλπ...



Συσκευασίες

- Δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20022)
- Δοσομετρική αντλία για δοχείο 5 λίτρων (Κωδ. 20023)

Φυσικές Ιδιότητες

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ■ Εμφάνιση: | Διαφανές - κίτρινο διάλυμα |
| ■ Πυκνότητα: | 1.02 g/cm ³ στους 20°C |
| ■ pH: | 7.0 - 8.0 (Ουδέτερο στους 20°C) |
| ■ pH (0.2%-1%): | 7.0 - 8.0 (Ουδέτερο στους 20°C) |
| ■ Οσμή: | Ουδέτερη |
| ■ Διατήρηση: | 5°C - 35°C |
| ■ Σταθερότητα: | 3 Έτη |
| ■ Βιοδιασπασιμότητα: | Σύμφωνα με την OCDE 301D |

Οδηγίες χρήσης

■ Με εμβάπτιση

Αραιώστε το NOSOZYM με τρεχούμενο νερό σε αραιώση έως 0,5%. (Η αντλία πατιέται μια φορά για μια δόση των 20 ml.)

Ανοίξτε όλα τα εργαλεία με αρθρώσεις. Εμβυθίστε τα στο διάλυμα ούτως ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα και αφήστε τα για λίγα λεπτά.

Ξεπλύνετε τα εργαλεία με τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε τα καλά. Τα εργαλεία σας είναι έτοιμα για αποστείρωση.

■ Σε πλυντήρια εργαλείων

Χρησιμοποιήστε το NOSOZYM σε αραιώση έως 0,5%. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου.

NOSOZYM®

Τρι-ενζυματικό καθαριστικό
χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων



Πιστοποιήσεις

- Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/EEC)
- Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I
- Εγγεγραμμένο στον Ε.Ο.Φ

Το NOSOZYM παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Η **MEDALKAN** τηρεί τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 που αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

■ Σε λουτρά υπερήχων

Το NOSOZYM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα λουτρά υπερήχων (αραίωση έως 0,5%).

Προσαρμόστε πάντα την δοσολογία και το χρόνο επαφής ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης και τη μέθοδο καθαρισμού που ακολουθείτε.

Αλλάζετε το διάλυμα κάθε 48 ώρες, ή όταν έχει λερωθεί πολύ. Μην αναμειγνύετε με άλλα απολυμαντικά προϊόντα. Η συσκευασία πρέπει να κλείνεται ερμητικά μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το προϊόν μεταξύ +5°C και +35°C.

Καθαρισμός ενδοσκοπίων

Ο καθαρισμός είναι ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας των ενδοσκοπίων για την επαναχρησιμοποίησή τους. Συνιστάται στον μηχανικό καθαρισμό τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών επιφανειών τους. Περιλαμβάνει το βούρτσισμα και το ξέπλυμα των εσωτερικών σωλήνων με αποστειρωμένο, ή φιλτραρισμένο, ή πόσιμο νερό, και καθαριστικό. Σκοπός του καθαρισμού είναι να απομακρυνθούν όλα τα οργανικά και ανόργανα υπολείμματα από τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.

Αν δεν γίνει σωστός μηχανικός καθαρισμός, βούρτσισμα και ξέπλυμα των επιφανειών, τα πρωτεϊνικά κατάλοιπα μπορεί να σκληρυνθούν σχηματίζοντας έτσι μία βιολογική μεμβράνη στον σωλήνα της βιοψίας του ενδοσκοπίου. Ο ανεπαρκής καθαρισμός μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την παραμονή εναποθέσεων στις επιφάνειες του ενδοσκοπίου, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει τα υγρά, ή τα αέρια της αποστείρωσης και της απολύμανσης να επιδράσουν αποτελεσματικά σε όλα τα μέρη των δυνητικά μολυσμένων επιφανειών.

Το ενδοσκόπιο θα πρέπει, αμέσως μετά την χρήση του και πριν την μηχανική, ή αυτοματοποιημένη αποστείρωσή του, να καθαρίζεται με ένα ενζυματικό καθαριστικό.

Το NOSOZYM είναι ένα συνδυασμό τριών ενζύμων. Τα ένζυμα σπάνε τα συστατικά των ρυτιών σε μικροσκοπικά θραύσματα έτσι οι ρύποι γίνονται υδατοδιαλυτή και ευκολότερα αφαιρούνται.

Χρησιμοποιήστε το NOSOZYM για καθαρισμό ενδοσκοπίων:

- με συμβατικό πλύσιμο χειρός σε αραίωση έως 0,5%.
- σε αυτόματο πλυντήριο σε αραίωση έως 0,5%.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του πλυντηρίου.

